



固定化抗菌成分Etak配合

Etak® Dental Spray

イータクデンタルスプレー20ml

- 本品は義歯やマウスピースだけでなく、歯ブラシにもお使いいただけます。
- スプレー1本で簡単除菌&24時間抗菌コーティング。
- 使い続けることで汚れが付きにくくなり、お手入れも簡単に。
- カンジダ菌、ミュータンス菌などの口腔内細菌を始め、ノロウイルスやインフルエンザウィルスなど広範囲な菌に有効です。

使用方法

口腔内装置を軽く洗浄して汚れを取り除き、水分を拭いた後、本品を数回スプレーし、乾燥させてからご使用ください。直接口にスプレーしないでください。商品にはアルコールが含まれているため、火気には注意してください。また、アレルギー体質の方やアルコールに対応できない素材には使用しないでください。

販売元：ザイコインターナショナル株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7-309

Tel:03-6457-8379 Fax:03-6457-8399

Email : info@ziecor.jp URL: <https://ziecor.jp>