

スーパーインテリアワックス

用途

クラウン内面のコーピング、ホストの細かい部分、インレー

特徴

- ① 柔らかい上に復元性を持っています。
- ② アンダーカットがあった場合や屈曲したホストでも、ちぎれずに引き抜く事が出来ます。
- ③ 入れしたマージンラインも確認でき、乗せたワックスの厚みも確認できます。
- ④ 石膏模型にまわりつくようにフィットします。
- ⑤ 収縮の非常に少ないワックスです。

使用方法

- ☆ このワックスでクラウンの内面、インレーの内面を薄くコーピングします。
- ☆ あまり温度を上げすぎると収縮が大きくなる為デブツクは避けて下さい。

| 試験成績 | 溶解温度 | 短縮率 | | | |
|---------------|------|------|------|------|------|
| | | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
| スーパーインテリアワックス | 53℃ | 0.07 | 0.48 | 1.30 | 4.08 |



オススメ!!

販売元 有限会社 アトミック
 大阪市府摂津市千里丘 4-11-14
 製造元 株式会社東洋化学研究所
 製造販売元
 東京都板橋区板橋 4-25-12

一般名症: 歯科材料 07 歯科用ワックス

届出番号 13B2X00026号

一般医療機器

容量 30g 医院標準価格 ￥2,100


適度な復元性

ワックスパターンの着脱時の変形に対して多少の補償がある事。その事により、多少のアンダーカットがあってもひび割れする事がない。インプラント支台、コーヌスの内冠等ワックスと相性の悪いメタルに直接盛ってもめくれる事が無い。

アンダーカットの有る症例



メタルに直接築盛

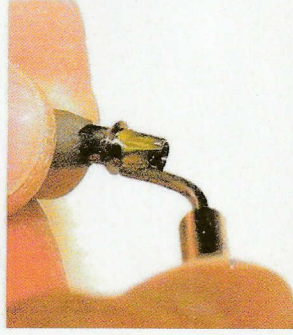

ユーザー様の意見

模型から浮き上がることがない
 ロングスパンの変形が抑えられる
 マージンを締め直す必要がない
 シャープなマージンでもちぎれない
 絡みつくようなフィット感

株式会社 **ニバタ**